

Sillón elevable

# MANUAL DE USUARIO



# MAJUT



## Como usar este manual



Su sillón elevable le llegará en excelentes condiciones previamente inspeccionado individualmente antes de salir de fábrica. Siguiendo las pautas de mantenimiento, mantendrá su condición de primera clase y le brindará años de total confiabilidad y satisfacción.

## Contenido

1. Introducción .....	4
2. Su producto .....	5
3. Antes de usar .....	6
Uso previsto .....	6
Instrucciones generales de seguridad .....	6
Símbolos en el sillón elevable .....	7
Transporte .....	8
Almacenamiento .....	8
4. Uso del sillón elevable .....	9
Operación del control manual .....	9
Zonas de atrapamiento .....	10
5. Instalación y ajustes .....	11
Forma de entrega .....	11
Montaje del sillón elevable .....	11
Montaje del respaldo .....	11
Retirada del respaldo .....	12
Montaje de las ruedas .....	12
6. Mantenimiento .....	13
Cuidado de la tela .....	13
Cuidado de la electrónica .....	14
Cada vez que se usa .....	14
Vida útil esperada .....	14
Fin de uso .....	14
7. Especificaciones técnicas .....	15
8. Garantía .....	16

# 1. Introducción

¡Felicidades! ¡Ahora eres dueño de un sillón elevable Majut!

Este sillón elevable está fabricada por personal calificado y comprometido. Está diseñado y fabricado de acuerdo con altos estándares de calidad.

Lea este manual del usuario antes de usar su sillón elevable por primera vez.

El uso inadecuado del sillón elevable puede provocar daños o lesiones.

Este manual del usuario se compone del diseño y las especificaciones del producto en el momento de su publicación. Como cambio de diseño, es posible que algunas ilustraciones e imágenes del manual no correspondan con el sillón elevable que compró. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de diseño. El fabricante renuncia a toda responsabilidad por cualquier lesión personal o daño a la propiedad que pueda ocurrir como resultado del uso inadecuado o inseguro de este producto. Los daños al producto debido a un uso inadecuado o falta de mantenimiento anularán la garantía.

Si sigue teniendo dudas después de leer este manual, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor especializado. Él / ella estará encantado de ayudarle en este tema.




## ¡ADVERTENCIA!

Indica una condición / situación potencialmente peligrosa. No seguir los procedimientos designados puede causar lesiones personales, daños a los componentes o mal funcionamiento. En el producto, este icono se representa como un símbolo negro sobre un triángulo amarillo con un borde negro.

## 2. Su producto

Proporciona una experiencia cómoda para sentarse y ayuda a las personas a ponerse de pie de nuevo, levantando y ayudando.

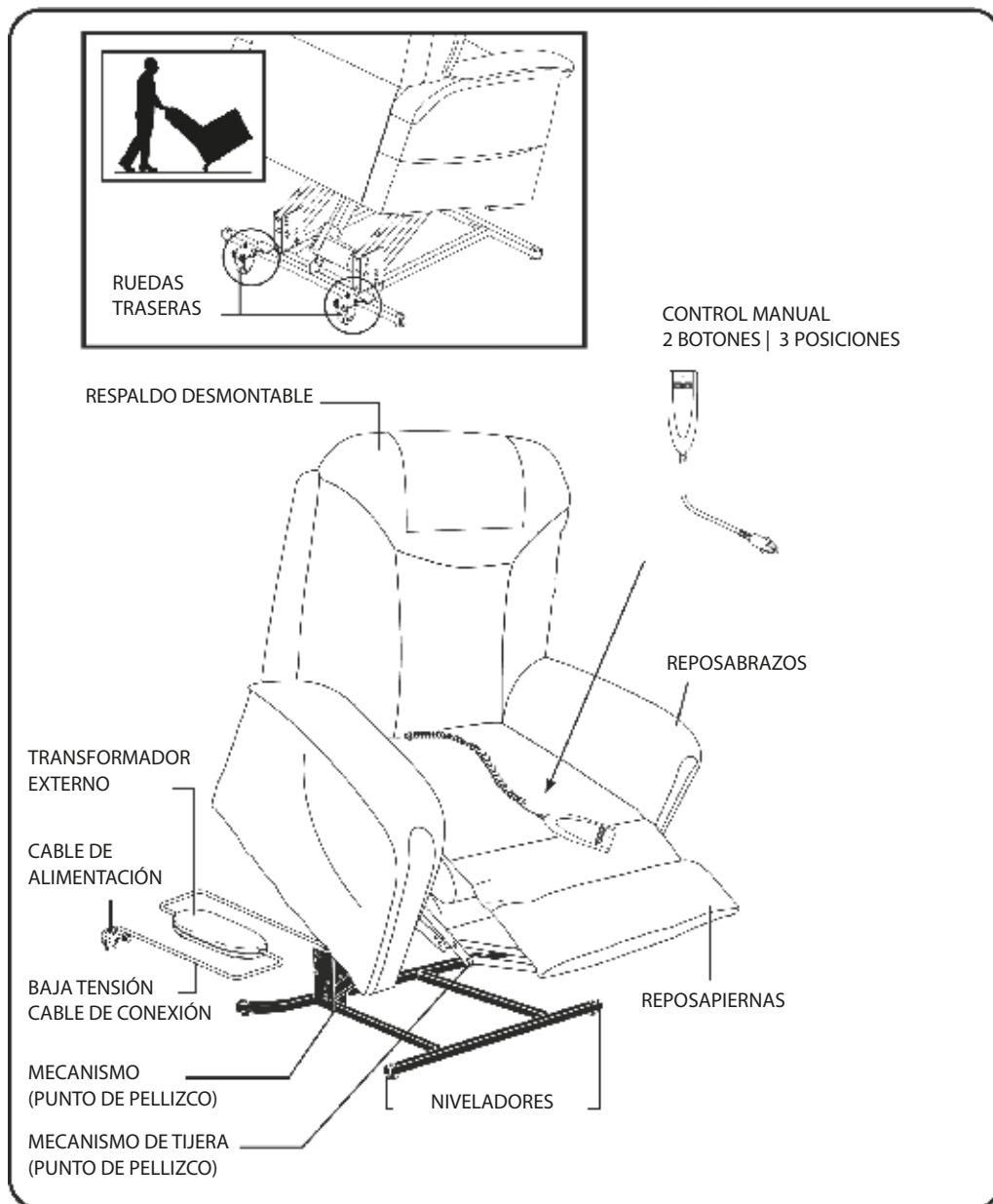

## 3. Antes de usarse

### Uso previsto

---

- Este sillón elevable es apto para uso en interiores.
- El sillón elevable es un dispositivo de mejora de vida de última generación diseñado para aumentar la movilidad.
- Está diseñado y fabricado para acomodar solo a una (1) persona con un peso máximo de 115 kg.
- Este sillón elevable es apto para personas mayores y personas con función de las piernas debilitadas.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos aprobados.
- La garantía de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales como se describe en este manual. El daño a su producto causado por un uso inadecuado o falta de mantenimiento hará que la garantía caduque.

### Instrucciones generales de seguridad

---

Tenga en cuenta las siguientes advertencias generales durante el uso:

- Enchufe el cable de alimentación directamente en la toma de corriente. No use un cable de extensión.
- Mantenga el control manual alejado de todas las superficies calientes.
- Asegúrese de que el sillón elevable esté colocado en un suelo nivelado.
- Asegúrese de que los cables no queden atrapados.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados de todas las piezas móviles mientras opera el sillón elevable.
- No se sienta en el respaldo, reposabrazos o reposapiernas. No se apoye demasiado en el reposapiernas al sentarse o levantarse del sillón.
- Al inclinar el respaldo y / o el reposapiernas, asegúrese de que haya suficiente espacio entre el sillón y la pared u otro objeto.
- No mueva el sillón elevable cuando esté acostado o conectado a la toma de corriente.
- Evite los puntos de pellizco, como los mecanismos de elevación y tijeras. Mantenga las manos y los pies alejados de estas áreas.

## Símbolos en el sillón elevable

---



¡Peligro de puntos de pellizco / aplastamiento! No coloque objetos o aditamentos en el trayecto de las piezas móviles.



Peligro de electricidad.



Lea y siga la información del manual del usuario.



Capacidad máxima de peso.



No conecte un cable de extensión al convertidor de CA / CC o al cargador de batería.



Deseche correctamente todos los componentes electrónicos, incluido el transformador externo, el control manual, las baterías, los motores de los actuadores y el cableado. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado para obtener más información.



No coloque objetos debajo del sillón elevable. Asegúrese de que el área esté libre de obstrucciones, incluidas mascotas y niños pequeños, durante la operación.




No coloque objetos debajo del reposapiés cuando el sillón elevable esté en la posición completamente reclinada. Asegúrese de que el área esté libre de obstrucciones, incluidas mascotas y niños pequeños, durante la operación.




No cubra ni coloque el transformador externo debajo del sillón elevable. Manténgalo en un área abierta y bien ventilada, libre de materiales extraños y lejos de posibles puntos de pellizco.



Equipo Clase II.

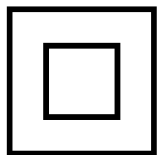

El LED verde indica que la unidad está encendida. No se aplica a todos los modelos.

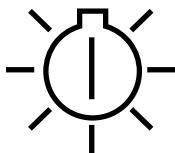

## Transporte

- No tire de los cojines del respaldo o del reposabrazos para mover su sillón elevable, ni siquiera por una pequeña distancia, ya que esto puede provocar que se rompa la tapicería o las costuras. En su lugar, agarre el marco inferior del sillón (lateral e inferior del sillón) para moverlo.
- Si el sillón elevable se va a transportar en un vehículo de motor, los componentes individuales y el propio sillón elevable deben asegurarse contra deslizamientos.

El sillón elevable solo debe moverse cuando esté sentado, en posición vertical. Cuando el sillón está en la posición de elevación, las ruedas se bloquearán y el sillón no podrá moverse.

## Almacenamiento

Asegúrese de que el sillón elevable esté seco para evitar moho y daños, mantenga la temperatura de almacenamiento entre +5 °C to +41 °C.



## 4. Uso del sillón elevable

Deben tomarse ciertas precauciones durante el funcionamiento de su sillón elevable. Lea y siga estas precauciones con atención para garantizar un funcionamiento seguro del sillón elevable y evitar lesiones y / o daños al producto.

### Operación del control manual


Dependiendo del modelo del sillón elevable, el control manual puede estar equipado con interruptores que controlan el movimiento del respaldo, la base del sillón y el reposapiernas.

Siga estos pasos para sentarse en su sillón elevable:

Mantenga presionado el botón ARRIBA (Fig. 1) para levantar su sillón elevable a la posición de pie.

Regrese a el sillón elevable y siéntese en el centro del asiento, usando como apoyo si es necesario los reposabrazos.

Presione y mantenga presionado el botón ABAJO (Fig. 1) para bajar el sillón elevable a una posición sentada cómoda.

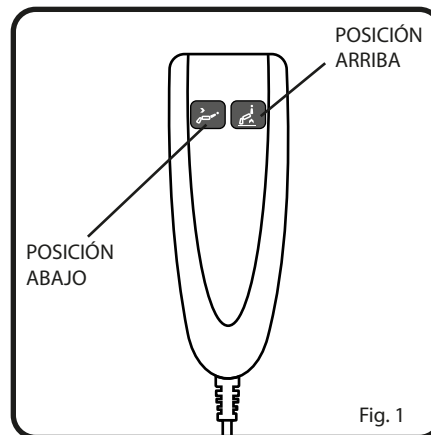

Siga estos pasos para levantarse en su sillón:

Mantenga presionado el botón ARRIBA para levantar su sillón elevable. Suelte el botón cuando el sillón elevable alcance una altura en la que pueda pararse cómodamente.

## Zonas de atrapamiento

---

Las siguientes imágenes muestran las posibles zonas de atrapamiento del sillón elevable. Tenga especial cuidado de no pellizcarse la ropa, los dedos u otros objetos entre estas piezas móviles.



## 5. Instalación y ajustes



¡ADVERTENCIA!

- Utilice únicamente los ajustes descritos en este manual.
- Asegúrese de que sus dedos, ropa, cinturones, hebillas o joyas no queden atrapados en las piezas móviles durante el montaje, uso o ajuste.

### Forma de entrega

Desembale su producto y verifique si la entrega está completa. Deben incluirse los siguientes elementos:

- Estructura con asiento, reposabrazos, reposapiernas y estructura inferior.
- Respaldo.
- Control manual.
- 2 ruedas + 4 niveladores de patas.
- Manual.


Verifique que su producto no presente daños durante el transporte. Si encuentra algún daño después de la entrega, comuníquese con el transportista.

### Montaje del sillón elevable

El sillón elevable se entrega completamente montado a excepción del respaldo y las ruedas.


#### Montaje del respaldo

1. Coloque el respaldo con los dos manguitos (1) sobre las placas (2) montadas en el asiento.
2. Empuje la parte superior del respaldo hasta que encaje en su lugar.
3. Asegúrese de que el respaldo esté firmemente fijado tirando de él ligeramente hacia arriba. Repita si el respaldo está suelto.
4. Use tiras de velcro para asegurar los cojines del respaldo sueltos al marco inferior.

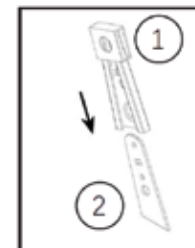


## Retirar el respaldo

1. Afloje la tapicería del respaldo tirando de las tiras de velcro del marco inferior.
2. Extraiga la cerradura con un destornillador de punta plana u otras herramientas. Al mismo tiempo, tire del respaldo hacia arriba hasta que se aflojen ambas placas de conexión.
3. Levante el respaldo del marco inferior.

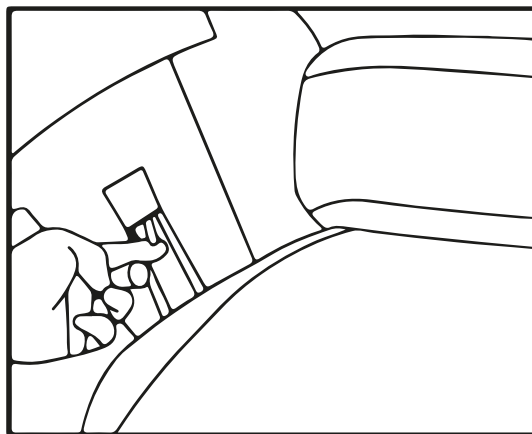

## Montaje de las ruedas

El sillón elevable se entrega con varias ruedas según la versión y la opción elegidas. Para fijar las ruedas en su lugar, utilice las tuercas (3) que se incluyen con la entrega.

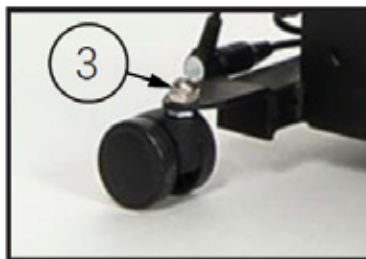

## 6. Mantenimiento

Su sillón elevable requerirá inspecciones de mantenimiento de rutina. Puede realizar algunas de estas comprobaciones, pero otras pueden requerir la asistencia de un distribuidor autorizado. Las reparaciones y reemplazos solo pueden ser realizados por personas capacitadas y solo deben usarse repuestos originales.

Si sigue las inspecciones de mantenimiento de esta sección según lo programado, puede ayudar a garantizar que su sillón le brinde años de funcionamiento sin problemas. Si tiene alguna pregunta sobre el cuidado de su sillón elevable, comuníquese con su distribuidor autorizado.

Antes de cada uso, inspeccione los siguientes puntos:

- Todas las piezas: limpias, presentes y sin daños o sin usar.
- Ruedas, respaldo: Bien asegurados.
- Estado general: Sin deformaciones, inestabilidad, debilidad o conexiones sueltas.

Comuníquese con su distribuidor especializado para posibles reparaciones o reemplazos de piezas.

### Cuidados de la tela

---

- Inspeccione la tela con regularidad en busca de tirones, rasgaduras o huecos.
- El método de limpieza recomendado para su sillón elevable es pasar la aspiradora con frecuencia y cepillar ligeramente para eliminar el polvo y la suciedad.

## **Cuidado de la electrónica**

---

- Inspeccione todos los mazos de cables para asegurarse de que no estén dañados o deshilachados.
- Si hay daños, desenchufe el sillón elevable y comuníquese con su distribuidor autorizado para obtener servicio.
- Mantenga todos los productos electrónicos libres de humedad y temperatura extremas. El sillón elevable está diseñado para uso en interiores únicamente.

## **Cada vez que se usa**

---

Antes de cada uso, desinfecte, inspeccione y mantenga el sillón elevable de acuerdo con las instrucciones del manual de mantenimiento.

## **Vida útil esperada**

---

La vida útil media de su sillón elevable es de 5 años.

La vida útil de un sillón puede aumentar o disminuir según la frecuencia de uso y mantenimiento.

## **Fin de uso**

---

Al final de su vida útil, debe desechar su sillón de acuerdo con la legislación ambiental local.

La mejor forma de hacerlo, es desmontar el sillón para facilitar el transporte de piezas reciclables.

## 7. Especificaciones técnicas

Los detalles técnicos a continuación solo son válidos para este sillón, en configuraciones estándar y condiciones ambientales óptimas. Tenga en cuenta estos detalles durante el uso. Los valores ya no son aplicables si su sillón ha sido modificado, dañado o está muy desgastado.

<b>Fabricación</b>	Loh Medical
<b>Tipo</b>	Sillón elevable eléctrico
<b>Modelo</b>	Majut
<b>Peso máximo de usuario</b>	264 lbs.   120 kg.
<b>Descripción</b>	<b>Dimensiones</b>
Longitud total (posición sentada)	872 mm (34.3 in)
Altura total (posición sentada)	1055 mm (41.5 in)
Profundidad del asiento	480 mm (18.9 in)
Altura del respaldo	760 mm (29.9 in)
Altura desmontada (sin respaldo)	635 mm (25 in)
Altura del asiento (posición sentada)	520 mm (20.5 in)
Profundidad desmontada (sin respaldo)	770 mm (30.3 in)
Distancia de la pared	420 mm (16.5 in)
Ancho total	800 mm (31.5 in)
Ancho del asiento	550 mm (21.7 in)
Altura de soporte de brazos	125 mm (4.9 in)
Longitud total (posición de reclinado)	1637 mm (64.4 in)
Profundidad del asiento (posición reclinada)	1065 mm (41.9 in)
Altura total (posición reclinada)	833 mm (32.8 in)
Altura del asiento (posición reclinada)	465 mm (18.3 in)
Longitud total (posición de elevación)	862 mm (33.9 in)
Altura total (posición de elevación)	1390 mm (54.7 in)
Ajuste de altura	540 mm (21.3 in)
Altura del asiento (posición de elevación)	540 mm (21.3 in)
Ángulo de reclinación del respaldo	147°
Ángulo de elevación del reposapiés	86°
Ángulo de elevación de sillón	26°
Adaptador AC / DC Inp	Input: 100-240V- , 50/ 60Hz, 1-3A: Output: DC29V, 1.8A
Actuador de grado de protección	IP20
Potencia nominal, actuador de ciclo de trabajo	DC24V, Max. 10%, max 2 min/18 min
Grado de protección control manual	IP20
Cumplimiento de EMC	EN IEC 61000-3-2:2019
Temperatura de almacenamiento y uso	+5 °C to +41 °C
Temperatura de funcionamiento de la electrónica	-10 °C to +40 °C
Almacenamiento y uso de humedad	30% to 70%
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos. Tolerancia de medida $\pm 15$ mm / 1,5 kg. / 1,5° .	

## 8. Garantía

Loh Medical garantiza el marco de madera y las partes eléctricas por un período de un año desde la fecha original de compra.

La mano de obra del reemplazo de estas partes no está cubierta.

Loh Medical no se hace responsable de pagar por ningún costo o gasto de revisión, envío o manipulación de partes que estén bajo garantía.

El abuso, el exceso de la máxima capacidad de carga, el uso inadecuado del consumidor o la alteración por parte de representantes no autorizados, anularán la garantía.